



Милиця підлокітна Herdegen дитяча Tiki синьо-помаранчева

200520

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.

Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.

- ⚠ Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.**
- Не намагайтесь внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Милиця «200520» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – розроблена для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіковані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВИЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- ВЧАСНО** замінюйте наконечники!
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на слизькій дорозі. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб, як інструмент для спуску або засіб для самозахисту.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** ручку виробу в якості підставки для ніг або опертя для сидіння.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	200520
Тип милици:	підлокітна
Матеріал:	алюміній
Матеріал руків'я:	пластмаса
Колір:	синій, помаранчевий
Висота до руків'я, (см):	від 55 до 101
Діаметр трубки, (см):	1,9
Вага, (кг):	0,5
Максимальне навантаження, (кг):	100

ВИКОРИСТАННЯ

Налаштування висоти милици

Для того, щоб відрегулювати необхідну висоту милиці потрібно взяти нижню частину трубки, натиснути на кнопку та потягнути за верхню та нижню частини милици. Кнопка повинна попасти та бути зафікована в необхідному отворі.



Використовуйте наконечники для запобігання пошкоджень.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою та м'якою ганчіркою після кожного використання. Виріб потрібно зберігати у сухому місці.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшенням конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристроя.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (четирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «200520» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

Виробник: SNC Herdegen / СНЦ Хердеген.

7 Rue Eugène Freyssinet 77500 Chelles, France / 7 Rue Евгène Фрейссінет 77500 Челес, Франція.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 3 від 11.01.2020.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: необмежений.

Гарантійний термін на виріб «200520» – 1 рік з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

