



Тростина: OSD-YU851

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією. Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження. Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Тростина «OSD-YU851» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВИЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- ВЧАСНО** замінійте наконечник!
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на слизькій дорозі. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб, як інструмент для спуску або засіб для самозахисту.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** ручку виробу в якості підставки для ніг або опертя для сидіння.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-YU851
Тип:	для правої та лівої руки
Матеріал:	база: сталь; шафт: алюміній

Матеріал руків'я:	спінений матеріал
Колір:	хром
Загальна висота, (см):	від 73 до 96
Вага, (кг):	0,43
Максимальне навантаження, (кг):	100

ВИКОРИСТАННЯ

Налаштування висоти палиці

Для того, щоб налаштувати правильну довжину потрібно поставити виріб біля себе на відстані 20-ти см. Потім трохи вигнути лікті й у цьому стані вибрати зручну довжину.

Регулювання висоти

Для того, щоб відрегулювати необхідну висоту виробу потрібно узяти верхню частину, натиснути на регулятор і розтягнути його.



Використовуйте наконечники для запобігання пошкодженню.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою та м'якою ганчіркою після кожного використання. Виріб потрібно зберігати у сухому місці.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодженнь або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані потрапленням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-YU851» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

Виробник: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd./ Джангсу Юю Медікал Еквіпмент енд Салплай Ко., Лтд. Yunyang Industrial Park, Danyang City, Jiangsu Province, China / Юньянг Індастріал Парк, Даньянґ Сіті, Джангсу Провінс, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 4 від 25.02.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: необмежений.

Гарантійний термін на виріб «OSD-YU851» – 1 рік з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

