



Ортопедичний матрац, «Artemidoro»

OSD-0516C

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.

ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Технічне обслуговування і догляд.....	5
5. Умови гарантії	6

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте матрац, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте матрац у випадку його пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Ортопедичний матрац «OSD-0516C» розроблений для максимальної зручності та безпеки користувача. Розрахований для використання у житлових приміщеннях.

Параметри матрацу:

- використовується як базовий матрац;
- для людей які проводять у ліжку від 10 до 15-ти годин;
- спеціальні внутрішні вакуумні відділи забезпечують циркуляцію повітря;
- верхній шар – в'язкий та пружний пінополіуретан з густиною 80 кг/м³, а нижній шар – пінополіуретан підвищеної жорсткості з густиною 39 кг/м³;
- водонепроникний чохол;
- матрац зберігає свої первинні властивості за умов тривалого використання;
- підходить для будь-яких функціональних ліжок;
- обмеження на максимально допустиме навантаження – 120 кг.

2. Заходи безпеки

Перед початком використання матрацу або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що всі частини матрацу у належному стані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан матрацу.

1. Проводьте **ЩОДЕННИЙ** огляд матрацу на наявність ознак перфорації та стирання.
2. **ПЕРІОДИЧНО** перевіряйте чохол матрацу на наявність будь-яких недоліків.
3. **НЕ** використовуйте чохол, якщо матрац вологий або погано висушений.
4. **НЕ** використовуйте миючі засоби, що містять хлор або розчинники. Це може пошкодити чохол та матрац. Проте, якщо використання продуктів, що містять хлор – необхідно, **РЕКОМЕНДУЄМО** використовувати слабкий розчин хлору та ретельно промити поверхню водою.
5. Під час прання чохла **ОБОВ'ЯЗКОВО** використовуйте з разом з матрацом інший чохол.

6. Стерилізація матрацу або чохла (якщо необхідно) **ПОВИННА** проводитись за допомогою м'яких миючих засобів. Але **ІСНУЄ ЙМОВІРНІСТЬ** пошкодити матрац або чохол.
7. **НЕ ТРИМАЙТЕ** виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я, цигарки, попільнички тощо).
8. **НЕ** використовуйте щільні товсті матерії, покривала тощо. Це зменшить терапевтичний ефект дії виробу. За необхідності проконсультуйтеся з лікарем.
9. **НЕ** допускайте попаданню на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття матраца.



Не використовуйте розчинники та абразивні препарати.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування матрацу за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-0516C
Матеріал матрацу:	піноматеріал
Матеріал чохла:	поліестер (40 %) + поліуретан (60 %)
Розмір, Д x Ш, (см):	190 x 87
Висота, (см):	14
Вага, (кг):	15

Максимальне навантаження, (кг):	120
---------------------------------	-----

4. Технічне обслуговування і догляд



Перевіряйте справність матрацу перед кожним використанням, якщо виріб використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

Неправильне використання, а також тривале застосування можуть призвести до пошкоджень й ознак зносу, що може створити привід до несправності виробу, якщо не усунути такі дефекти вчасно.

Догляд

Чистити поверхню матрацу необхідно м'якими та неабразивними препаратами.

На разі забруднення матрацу інфекційними або потенційно небезпечними речовинами необхідно продезінфікувати миючим засобом.

Регулярно оглядайте усі компоненти матрацу на відсутність видимих пошкоджень. У разі виявлення дефектів подальша експлуатація матрацу можлива тільки опісля усунення усіх пошкоджень. По закінченню терміну експлуатації ортопедичний матрац необхідно утилізувати згідно з чинним законодавством України.



У разі використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати матрац, щоб уникнути інфекцій.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції матрацу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



5. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____