



Матрац «Cargumixt-NG»:

758754

Інструкція

## ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.  
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.  
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Матрац «758754» (далі за паспортом – виріб / матрац) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПРОВІДЬТЕ** щоденний огляд матрацу на наявність ознак перфорації.
- ПЕРІОДИЧНО** перевіряйте чохол матрацу на наявність будь-яких недоліків.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** чохол, якщо матрац вологий або погано висушений.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** миючі засоби, що містять хлор або розчинники. Це може пошкодити чохол та матрац. Проте, якщо використання продуктів, що містять хлор – необхідно, **РЕКОМЕНДУЄМО** використовувати слабкий розчин хлору та ретельно промити поверхню водою.
- ПІД ЧАС** прання чохла **ОБОВ'ЯЗКОВО** використовуйте разом з матрацом інший чохол.
- СТЕРИЛІЗАЦІЯ** матрацу або чохла (якщо необхідно) **ПОВИННА** проводитись за допомогою м'яких миючих засобів. Але **ІСНУЄ ЙМОВІРНІСТЬ** пошкодити матрац або чохол.
- НЕ ТРИМАЙТЕ** виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я, цигарки, попільнички тощо).
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попаданню на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття матраца.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	758754
Маркування CE:	так
Клас медичного пристрою:	I клас
Рівень профілактики:	середній (за шкалою Нортон (Norton))
Матеріал матрацу:	піноматеріал
Густина піноматеріалу:	39 кг/м <sup>3</sup>
Матеріал чохла:	поліестер (43%) + поліуретан (57%)
Розмір матраца, Д х Ш, (см):	198 x 88
Висота, (см):	14
Вага, (кг):	15
Максимальне навантаження, (кг):	120

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати.

### Догляд

Неправильне використання, а також тривале застосування можуть призвести до пошкоджень й ознак зносу, що може створити привід до несправності виробу, якщо не усунути такі дефекти вчасно.

Чистити поверхню матрацу необхідно м'якими та неабразивними препаратами.

На разі забруднення матрацу інфекційними або потенційно небезпечними речовинами необхідно продезінфікувати миючим засобом.

Регулярно оглядайте усі компоненти матрацу на відсутність видимих пошкоджень. У разі виявлення дефектів подальша експлуатація матрацу можлива тільки опісля усунення усіх пошкоджень. По закінченню терміну експлуатації матрац необхідно утилізувати згідно з чинним законодавством України.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів однієї або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

## УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА:** Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

## ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Виріб «758754»** відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

**Виробник:** Pharmaouest Industries / Фармавест Індастріс.  
Z.A. Actipole 35, 2 rue de Saint Coulban - BP12,35540 Miniac Morvan, France / З.А. Актіполь 35, 2 рю де Сан Кульбан - БП12, 35540 Міньяк Морван, Франція.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 4 від 08.07.2019.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Термін придатності виробу:** необмежений.

**Гарантійний термін на виріб «758754»** – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

