



# Протипролежневий матрац з компресором: OSD-QDC-303

## Інструкція

### ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.  
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.  
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Протипролежневий матрац «OSD-QDC-303» (далі за паспортом – виріб / матрац) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВІЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- НАПОВНЮВАТИ** повітрям матрац **НЕОБХІДНО** за допомогою компресора, що входить у комплект. **ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИСТРОЇВ МОЖЕ ПОШКОДИТИ ВИРІБ.**
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.
- НЕ ТРИМАЙТЕ** виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я).
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попадання на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття матраца та його функціональність.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** щільні товсті матерії, покривала тощо. Це зменшить терапевтичний ефект дії виробу. За необхідності проконсультуйтеся з лікарем.
- НЕ НАМАГАЙТЕСЯ** перемістити обладнання, якщо воно підключене в електромережу.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Матеріал:	ПВХ
Розмір матраца, Д x Ш, (см):	200 x 90

Висота матраца, (см):	7
Робочий тиск компресора, (мм рт. ст.):	від 40 до 100
Тип тиску:	змінний
Функція статичного тиску:	ні
Час зміни циклу, (хв.):	6
Електроживлення, (В / Гц):	220 / 50
Максимальне навантаження, (кг):	135
Комплектація:	матрац + компресор + набір для ремонту + з'єднувальні трубки

### ВИКОРИСТАННЯ

- Покладіть матрац на ліжко таким чином, щоб компресор (див. Рис. 1) був у нижній частині ложа.
- Використовуйте вбудовані гачки для надійної фіксації компресора на спинці ліжка біля ніг або на місці з гладкою та рівною поверхнею.
- Підключіть компресор до матраца за допомогою з'єднувальних трубок.
- Підключіть компресор до розетки. Переконайтеся, що шнур живлення знаходиться у безпечному положенні.
- Увімкніть кнопку живлення на панелі керування компресора. Матрац автоматично почне заповнюватися повітрям.
- Коли матрац буде повністю надутий, налаштуйте його згідно з потребами користувача, використовуючи тумблер на панелі керування.

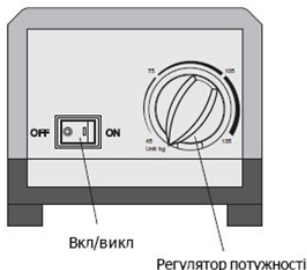


Рис. 1

### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів однієї або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

### УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 24 місяці з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА:** Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

### ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Виріб «OSD-QDC-303»** відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



**Виробник:** Guangdong YueHua Medical Instrument Factory Co., Ltd. / Гуангдонг Іуєруа Медісал Інструмент Фастори Со., Лтд.

Rongsheng Science and Technology Zone Daxue Road 515063 Shantou, China / Ронгшенг Сцієнсе анд Течнолоґі Зоне, Дахуе Роад, 515063 Шантоу, Китай.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 9 від 18.03.2019.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Термін придатності виробу:** необмежений.

**Гарантійний термін на виріб «OSD-QDC-303»** – 24 місяці з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

