



Матрац для функціонального ліжка «POLYMULTI VISCO»: Р181МРРМНІ

Інструкція

Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.

**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтесь внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Матрац для функціонального ліжка «Р181МРРМНІ» (далі за паспортом – виріб / матрац) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЕС виробів медичного призначення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПРОВОДЬТЕ** щоденний огляд матрацу на наявність ознак перфорації.
- ПЕРІОДИЧНО** перевіряйте чохол матрацу на наявність будь-яких недоліків.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** чохол, якщо матрац вологий або погано висушений.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** миючі засоби, що містять хлор або розчинники. Це може пошкодити чохол та матрац. Проте, якщо використання продуктів, що містять хлор – необхідно, **РЕКОМЕНДУЄМО** використовувати слабкий розчин хлору та ретельно промити поверхню водою.
- ПІД ЧАС** прання чохла **ОБОВ'ЯЗКОВО** використовуйте разом з матрацом інший чохол.
- СТЕРИЛІЗАЦІЯ** матрацу або чохла (якщо необхідно) **ПОВИННА** проводитись за допомогою м'яких миючих засобів. Але **ІСНУЄ ЙМОВІРНІСТЬ** пошкодити матрац або чохол.
- НЕ ТРИМАЙТЕ** виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я, цигарки, попільнічки тощо).
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попаданню на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття матраца.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	Р181МРРМНІ

Матеріал матрацу:	двошарова піна різної щільності: 10 см піни з щільністю 40 кг/м ³ ; 4 см в'язкопружної піни з ефектом пам'яті і щільністю 80 кг/м ³ в зоні сідниць і п'ят.
Матеріал чохла:	технологія POLYMAILLE®: покриття з поліуретану на трикотаж
Розмір матраца, Д x Ш x В, (см):	198 x 87 x 14
Розмір ліжка для матрацу, Д x Ш, (см):	200 x 90
Мінімальне навантаження, (кг):	35 – 130
Максимальне навантаження, (кг):	77 – 286

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Догляд за матрацом



- Промити під прозорою водою (не занурюйте матрац повністю у воду).
- Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
- Сушити далеко від джерел тепла.
- Не прасувати.
- Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Догляд за чохлом



- Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +95° С.
- Максимально дозволена концентрація хлору <1000 проміле (у цьому випадку промивання чистою водою обов'язкове).
- Сушка при помірній температурі.
- Не прасувати.
- Не використовуйте абразивні матеріали. Не піддавати сухому хімічному чищенню.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшенням конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 24 місяці з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристроя.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (четирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «Р181МРРМНІ» відповідає технічним вимогам і визнаний придатними для експлуатації.

Виробник: System Assistance Medical SAS / Систем Ассистанс Медікал САС. ZAE Casseneuil Road - LE LEDAT, 47300 Villeneuve sur Lot - FRANCE / ЗАЕ Кассней Роад – ЛЕ ЛЕДАТ, 47300 Вільнев сюр Лот - ФРАНЦІЯ.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 4 від 18.12.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на виріб «Р181МРРМНІ» – 2 роки з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюються за рахунок клієнта.

