



Санітарно-гігієнічне обладнання:  
500410 / 500411 / 500200 / 500300

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## УМОВИ ГАРАНТІЇ

### ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.  
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.  
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Санітарно-гігієнічне обладнання «500410 / 500411 / 500200 / 500300» (далі за паспортом – виріб / туалетне сидіння / сидіння / насадка) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком використання виробу або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- НЕОБХІДНО** періодично оглядати виріб на стійкість.
- КОРИСТУВАЧАМ** з обмеженими фізичними можливостями **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** звертатися за допомогою до асистента.
- МАКСИМАЛЬНО** допустиме навантаження на туалетне сидіння – 185 кг. **НИКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- НЕ** нахилийтеся, сидячи на туалетному сидінні, намагаючись дотягтися до чого-небудь, оскільки Ви можете перевернутися!
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекції.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

Параметр	Значення	
Модель:	500200	500300
Матеріал:	ортопедична піна + ПВХ	
Колір:	білий	
Висота, (см):	11	
Максимальне навантаження, (кг):	185	
Комплектація:	–	кришка

Параметр	Значення	
Модель:	500410	500411
Матеріал:	літєвий поліпропілен	
Колір:	білий	
Висота, (см):	11	
Максимальне навантаження, (кг):	185	
Комплектація:	–	кришка

### ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Підходять до більшості стандартних туалетів.
- Збільшують висоту туалету на 11 см.
- Матеріал насадок швидко нагрівається до температури тіла та надовго зберігає тепло. Легко дезінфікується.

### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - пошкодження, які викликані потрапленням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА:** Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

### ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Санітарно-гігієнічне обладнання «500410 / 500411 / 500200 / 500300» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

**Виробник:** SNC Herdegen / СНЦ Хердеген.  
7 Rue Eugène Freyssinet 77500 Chelles, France / 7 Rue Евгене Фрейссинет 77500 Челес, Франція.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 5 від 08.10.2019.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Термін придатності виробу:** необмежений.

**Гарантійний термін на санітарно-гігієнічне обладнання «500410 / 500411 / 500200 / 500300»** – 1 рік з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

