



Підголівник: OSD-BL910104

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Підголівник «OSD-BL910104» (далі за паспортом – виріб) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком використання виробу або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- КОРИСТУВАЧАМ** з обмеженими фізичними можливостями **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** звертатися за допомогою до асистента.
- МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЕ** навантаження на підголівник – 125 кг. **НИКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- БУДЬ-ЯКІ** пошкодження повинні бути **УСУНУТІ**.
- ПОВЕРХНЮ** підголівника **ПОТРІБНО** очистити за допомогою м'якого миючого засобу. Засоби для чищення повинні бути м'якими. Можна використовувати побутові очисні засоби.
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-BL910104
Матеріал:	сталь + сітчастий акрил
К-кість позицій регулювання, (шт.):	5
Розміри, Г x В x Ш, (см):	57 x 57 x 56
Максимальне навантаження, (кг):	125

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

Багаторазове пересування, неправильне використання, а також тривале застосування можуть призвести до пошкоджень й ознак зносу, що може створити привід до несправності виробу, якщо не усунути такі дефекти вчасно.

Чистити поверхню підголівника необхідно м'якою ганчіркою. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати.

На разі забруднення підголівника інфекційними або потенційно небезпечними речовинами необхідно продезінфікувати миючим засобом.

Зберігайте підголівник в сухому місці, подалі від води.

Регулярно оглядайте усі компоненти підголівника на відсутність зовнішніх пошкоджень. На разі виявлення дефектів подальша експлуатація підголівника можлива тільки опісля усунення усіх несправностей. По закінченню терміну експлуатації підголівник необхідно утилізувати згідно з чинним законодавством України.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: *Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.*

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-BL910104» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

Виробник: Bliss Health Products Co., Ltd / Блісс Хелс Продуктс Ко., Лтд. 96 Zhaoyi Rd., Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R.C. / 96, Чжаої Рд, Донгшен Таун, Жонгшан Сіті, Гуангдонг Провінс, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 3 від 15.05.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: необмежений.

Гарантійний термін на виріб «OSD-BL910104» – 1 рік з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

