



## Стілець-туалет:

**OSD-BL740101**

### ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.

**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.  
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.  
Не намагайтесь внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Стілець-туалет «OSD-BL740101» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗА УМОВ** зміни положення центру ваги за рахунок зміщення тіла або через зміну навантаження на стілець-туалет, а також нахилу на кут більше 10 градусів, підвищується можливість перекидання.
- НЕ ЗАЛИШАЙТЕ** користувача у стільці-туалеті без нагляду.
- УСТАНОВЛЮЙТЕ** стілець-туалет на рівну горизонтальну поверхню.
- АСИСТЕНТ ПОВИНЕН:**
  - перевірити належну якість стільця-туалету;
  - попереджати користувача про свої дії, особливо під час нахилу стільця-туалету.
- НЕ НАХИЛЯТИ** стілець-туалет уперед.
- МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЕ** навантаження на стілець-туалет – 225 кг. **НИКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- НЕ НАМАГАЙТЕСЯ** вставати, сідати, робити кроки, підніматися, нахилятися самостійно: хтось завжди повинен вам допомагати.
- НЕ НАХИЛЯЙТЕСЯ**, сидячи у стільці-туалеті, намагаючись дотягнутися до чого-небудь, оскільки Ви можете перевернутися!
- НА РАЗІ** використання виробу різними користувачами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфіковати стілець-туалет, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-BL740101
Матеріал рами:	сталь
Тип поруччя:	відкидні
Ширина сидіння, (см):	59
Висота сидіння, (см):	50 – 60
Вага, (кг):	10
Максимальне навантаження, (кг):	225
Комплектація:	санітарна емність з протикраплинною системою та кришкою

### ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Поруччя стільця-туалету – відкидні, що спрощує пересаджування. Покриті нековзкими накладками для надійної опори для рук.
- Рама стільця-туалету виготовлена зі сталі з використанням технології порошкового фарбування, яка збільшує термін експлуатації виробу.
- Висота стільця-туалету регулюється кнопковим фіксатором.
- Ніжки стільця-туалету обладнані гумовими противоззиковими наконечниками.
- Сидіння та санітарне обладнання – з'ємні, виготовлені з гіпоалергенної пластмаси.

### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом три-валого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протираїть виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб.**

- КОМПЛЕКТАЦІЯ**
- Стілець-туалет 1 шт.
  - Інструкція 1 прим.

### УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрію.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (четирнадцяти) днів, не враховуючи дні купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА:** Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

### ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-BL740101» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

**Виробник:** Bliss Health Products Co.,Ltd / Блісс Хелс Продуктс Ко., Лтд. 96 Zhaoyi Rd., Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R.C. / 96, Чжаої Рд, Донгшен Таун, Жонгшан Сіті, Гуандунг Provінс, Китай.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 6 від 21.05.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: необмежений.

Гарантійний термін на виріб «OSD-BL740101» – 1 рік з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

