

Стандартний стілець-туалет OSD-RB-2105K

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



Дякуємо, що віддали перевагу нашому виробу.

Будь-ласка уважно ознайомтеся з цією інструкцією і дотримуйтеся її під час використання виробу.



Цей виріб відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЕЕС



Попередження!

- До початку експлуатації ретельно вивчіть інструкцію.
- Завжди перевіряйте, що пристрій знаходиться в робочому стані, перш ніж використовувати його. Не використовуйте виріб у випадку пошкодження.
- Виріб вже готовий до експлуатації і не передбачає будь-якого технічного втручання.
- Максимальне навантаження 136 кг. ніколи не перевищуйте цей ліміт.

ЗМІСТ

1. ОПИС
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ
4. ДОГЛЯД ЗА ВИРОБОМ
5. ГАРАНТІЯ

1. ОПИС

Стілець-туалет OSD-RB-2105K належить до санітарно-гігієнічних виробів, що використовується для полегшення догляду за пацієнтами в період реабілітації, а також призначений для людей з обмеженими фізичними можливостями. Стілець виготовлений зі сталеві рами, оснащений також пластиковим туалетним судном з протикрапельною системою та зручною кришкою в центральній частині сидіння. Ніжки стільця оснащені гумовими наконечниками, що не ковзають.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал рами: сталь
Ширина сидіння: 45 см
Висота сидіння: від 43 до 58 см
Підлокітники: фіксовані
Вага: 5,2 кг
Максимальне завантаження: 136 кг

3. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

Витягніть усі елементи стільця з картонної упаковки, звільніть від пакувального матеріалу. Приєднайте по черзі всі ніжки до рами стільця. Зверніть увагу, що вони телескопічні, тому обов'язково виберіть потрібну висоту і встановіть на однаковому рівні всі ніжки (обов'язково перевірте кнопки фіксації). Встановіть спинку стільця у відповідні отвори на задній частині рами стільця. Остерігайтеся затискання пальців! Встановіть відро і стільчак у хрестовину рами. Стілець для туалету готовий до використання! Конструкція виробу передбачає, що у випадку необхідності перевезення та зберігання стілець можна скласти – отсоединив все чотири ножки (попередньо вийнявши судно).

УВАГА: Сидячи на стільці, тримайтеся за підлокітники, щоб уникнути падіння.

4. ДОГЛЯД ЗА ВИРОБОМ

Стілець треба мити теплою водою з м'якими миючими засобами. Не застосовуйте при чищенні агресивні засоби та абразивні речовини. Протирайте сухою м'якою тканиною. При необхідності обробляйте дезінфікуючими речовинами. Після обробки протирайте насухо.

5. ГАРАНТІЯ



Умови гарантії:

ТОВ "ОСД Східна Європа " гарантує відсутність заводських дефектів й роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації викладених у інструкції;
 - б) при наявності ознак слідів стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу тощо);
 - в) якщо пристрій використовувався у не по прямому призначенню.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України "Про захист прав споживачів":
Обмін товару належної якості проводиться за умови, що він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: *Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів може бути змінена виробником без попереднього повідомлення.*

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____