



Тростина: OSD-BL560200

## ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією. Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження. Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Тростина «OSD-BL560200» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВИЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВІДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- ВЧАСНО** замінійте наконечник!
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на слизькій дорозі. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб, як інструмент для спуску або засіб для самозахисту.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** ручку виробу в якості підставки для ніг або опертя для сидіння.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-BL560200
Тип:	для правої та лівої руки
Конструкція:	складна

Матеріал:	алюміній
Матеріал руків'я:	дерево
Колір:	бронза
Загальна висота, (см):	від 82 до 92
Діаметр, (см):	1,9
Максимальне навантаження, (кг):	90

## ВИКОРИСТАННЯ

### Налаштування висоти палиці

Для того, щоб налаштувати правильну довжину потрібно поставити виріб біля себе на відстані 20-ти см. Потім трохи вигнути лікті й у цьому стані вибрати зручну довжину.

### Регулювання висоти

Для того, щоб відрегулювати необхідну висоту виробу потрібно узяти верхню частину, натиснути на регулятор і розтягнути його.

### Складання

Щоб скласти модель OSD-BL560200 потрібно взяти верхню частину однією рукою й потягнути за нижню частину іншою рукою.



**Використовуйте наконечники для запобігання пошкодженню.**

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою та м'якою ганчіркою після кожного використання. Виріб потрібно зберігати у сухому місці.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодженню або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

## УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА:** Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

## ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Виріб «OSD-BL560200»** відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

**Виробник:** Bliss Health Products Co., Ltd / Блісс Хелс продуктс Ко., Лтд. 96, Zhaoyi Rd., Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R.C / 96, Чжаої Рд, Донгшен Таун, Жонгшан Сіті, Гуангдонг Провінс, Китай.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 6 від 27.12.2019.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Термін придатності виробу:** необмежений.

**Гарантійний термін на виріб «OSD-BL560200»** – 1 рік з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

