



Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Реабілітаційні ходунці «OSD-НК-1100V» (далі за паспортом – виріб / ходунці) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВИЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- ВЧАСНО** замінійте наконечники!
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
- НІКОЛИ** не сидіть на ходунцях.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб на сходах та ескалаторах.
- МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ** на виріб – 100 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-НК-1100V
Матеріал:	сталь
Ширина, (см):	60
Глибина, (см):	74
Висота рами, (см):	88
Висота опертя, (см):	94
Висота пахвових опор, (см):	115 – 145

Висота сидіння від підлоги, (см):	74
Ширина у складеному вигляді, (см):	26
Діаметр коліс, (дюйми):	3"
Вага, (кг):	10
Максимальне навантаження, (кг):	100

ВИКОРИСТАННЯ

Розкладання

- Розкладіть раму.
- Установіть бажану для користувача висоту.
- Перевірте «ходові якості» реабілітаційних ходунців.

Гальма

Важливо, щоб обидва гальма були у «паркувальному» положенні. Для гальмування натисніть на два фіксатори на задніх колесах.

Регулювання висоти пахвової опори

Для регулювання висоти пахвової опори потрібно відкрутити фіксуючі важелі та відрегулювати ручки на відповідній висоті. Ручки ніколи не повинні бути вище, ніж зазначено на трубках з рельєфними насічками. Затягувати стопорні важелі треба таким чином, щоб вони були направлені донизу. Для того, щоб повернути важіль, треба спочатку потягнути його назовні.



Перевіряйте гальмівний механізм опісля урегулювання пахвової опори за висотою. Переконайтеся, що усі кріплення надійно затягнуті та зафіксовані.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.



Використовуйте ходунці тільки у якості опори для рук під час пересування. Не використовуйте ходунці, як інвалідний візок. Максимальне навантаження – 100 кг. Не перевищуйте цей ліміт.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-НК-1100V» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: Hong Ky Co., Ltd / Гонг Ки Ко., Лтд.

Д2 Стреет, Бінг Чуан Мануфактурінг Зоне, Тгуан Ан, Бінг Дуонг Провінце, В'єтнам / D2 Street, Binh Chuan Manufacturing Zone, Thuan An, Binh Duong Province, Vietnam.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 4 від 12.02.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: необмежений.

Гарантійний термін на виріб «OSD-НК-1100V» – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

