



Стілець-туалет:

OSD-2106D

## ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.  
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.  
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Стілець-туалет «OSD-2106D» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома людям з частковою втратою функцій опорно-рухового апарату.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗА УМОВ** зміни положення центру ваги за рахунок зміщення тіла або через зміну навантаження на стілець-туалет, а також нахилу на кут більше 10 градусів, підвищується можливість перекидання.
- НЕ ЗАЛИШАЙТЕ** користувача у стільці-туалеті без нагляду.
- УСТАНОВЛЮЙТЕ** стілець-туалет на рівну горизонтальну поверхню.
- АСИСТЕНТ ПОВИНЕН**:
  - перевірити належну якість стільця-туалету;
  - попереджати користувача про свої дії, особливо під час нахилу стільця-туалету.
- НЕ НАХИЛЯТИ** стілець-туалет уперед.
- МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЕ** навантаження на стілець-туалет – 136 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- НЕ НАМАГАЙТЕСЯ** вставати, сідати, робити кроки, підніматися, нахилитися самостійно: хтось завжди повинен вам допомагати.
- НЕ НАХИЛЯЙТЕСЯ**, сидячи у стільці-туалеті, намагаючись дотягтися до чого-небудь, оскільки Ви можете перевернутися!
- НА РАЗІ** використання виробу різними користувачами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати стілець-туалет, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-2106D
Матеріал рами:	сталь
Ширина сидіння, (см):	46
Висота сидіння, (см):	47 – 58
Вага, (кг):	8,2
Максимальне навантаження, (кг):	136

## ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Поруччя стільця-туалету – відкидні. Покриті нековзкими накладками для надійної опори для рук.
- Рама стільця-туалету виготовлена зі сталі з використанням технології порошкового фарбування, яка збільшує термін експлуатації виробу.
- Висота стільця-туалету регулюється кнопковим фіксатором.
- Ніжки обладнані гумовими протиковзкими наконечниками.
- Сидіння та санітарне обладнання – з'ємні, виготовлені з гіпоалергенної пластмаси.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодженнь або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Стілець-туалет \_\_\_\_\_ 1 шт.
- Інструкція \_\_\_\_\_ 1 прим.

## УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА:** *Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.*

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

## ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Виріб «OSD-2106D»** відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

**Виробник:** Combo (Zhongshan) Medical Equipment Co.,Ltd. / Комбо (Жонгшан) Медікал Еквіпмент Ко., Лтд.  
Building 1, № 6, East Tongxing Road, Dongshen Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China / Білдинг 1, № 6, Еаст Тонгксінг Роад, Донгшен Товн, Жонгшан Сіті, Гуандонг Провінсе, Китай.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 3 від 15.05.2019.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Термін придатності виробу:** необмежений.

**Гарантійний термін на виріб «OSD-2106D»** – 1 рік з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

