



Стілець-туалет:

OSD-2107D

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.

**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтесь внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контролю виробництва на усіх його стадіях.

Стілець-туалет «OSD-2107D» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома людям з частковою втратою функцій опорно-рухового апарату.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЕС виробів медичного призначення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗА УМОВ** зміни положення центру ваги за рахунок зміщення тіла або через зміну навантаження на стілець-туалет, а також нахилу на кут більше 10 градусів, підвищується можливість перекидання.
- НЕ ЗАЛИШАЙТЕ** користувача у стільці-туалеті без нагляду.
- УСТАНОВЛЮЙТЕ** стілець-туалет на рівну горизонтальну поверхню.
- АСІСТЕНТ ПОВИНЕН:**
 - перевірити належну якість стільця-туалету;
 - попереджати користувача про свої дії, особливо під час нахилу стільця-туалету.
- НЕ НАХИЛЯТИ** стілець-туалет уперед.
- МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЕ** навантаження на стілець-туалет – 136 кг. **НИКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- НЕ НАМАГАЙТЕСЯ** вставати, сідати, робити кроки, підніматися, нахилятися самостійно: хтось завжди повинен вам допомагати.
- НЕ НАХИЛЯЙТЕСЯ**, сидячи у стільці-туалеті, намагаючись дотягти до чого-небудь, оскільки Ви можете перевернутися!
- НА РАЗІ** використання виробу різними користувачами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати стілець-туалет, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значення |
|-----------------------------------|--|
| Модель: | OSD-2107D |
| Матеріал рами: | сталь |
| Конструкція рами: | цилісна на колесах |
| Тип поруччя: | відкидні |
| Ширина сидіння, (см): | 35 |
| Висота сидіння від підлоги, (см): | 40 – 52 |
| Діаметр коліс, (дюйми): | 3 (литі) |
| Вага, (кг): | 6,3 |
| Максимальне навантаження, (кг): | 136 |
| Комплектація: | санітарна ємність з проти-краплинною системою та кришкою |

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Поруччя стільця-туалету – відкидні. Покриті нековзкими накладками для надійної опори для рук.
- Рама стільця виготовлена зі сталі.
- Висота стільця-туалету регулюється кнопковим фіксатором.
- Ніжки обладнані колесами. Задні колеса з гальмами.
- Сидіння та санітарне обладнання – з'ємні, виготовлені з гіпоалергенної пластмаси.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом три-валого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшенням конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то **оглядайте** його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб.



КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Стілець-туалет _____ 1 шт.
- Інструкція _____ 1 прим.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб змінюється з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрію.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (четирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-2107D» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.



Виробник: Combo (Zhongshan) Medical Equipment Co.,Ltd. / Комбо (Жонгшан) Медікал Еквіпмент Ко.,Лтд.

Building 1, № 6, East Tongxing Road, Dongshen Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China / Білдинг 1, № 6, Еаст Тонгксінг Роад, Донгшен Тон, Жонгшан Сіті, Гуандунг Провінс, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа», адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 3 від 18.05.2020.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: необмежений.

Гарантійний термін на виріб «OSD-2107D» – 1 рік з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

