



Протипролежневий матрац з компресором: OSD-MAT-PREMIUM

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Протипролежневий матрац «OSD-MAT-PREMIUM» (далі за паспортом – виріб / матрац) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВІЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- НАПОВНЮВАТИ** повітрям матрац **НЕОБХІДНО** за допомогою компресора, що входить у комплект. **ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИСТРОЇВ МОЖЕ ПОШКОДИТИ ВИРІБ.**
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.
- НЕ ТРИМАЙТЕ** виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я).
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попадання на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття матраца та його функціональність.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** щільні товсті матерії, покривала тощо. Це зменшить терапевтичний ефект дії виробу. За необхідності проконсультуйтеся з лікарем.
- НЕ НАМАГАЙТЕСЯ** перемістити обладнання, якщо воно підключене в електромережу.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Матеріал:	ПВХ
Розмір матраца, Д x Ш, (см):	200 x 90

Висота матраца, (см):	14
Розмір компресора, Д x Ш x В, (см):	24,5 x 16 x 15
Робочий тиск компресора, (мм рт. ст.):	від 40 до 110
Тип тиску:	змінний
Час зміни циклу, (хв.):	12
Електроживлення, (В / Гц):	220-240 / 50; 100-120 / 60
Максимальне навантаження, (кг):	135
Гарантія, (міс.):	24

ВИКОРИСТАННЯ

- Покладіть матрац на ліжко таким чином, щоб компресор (див. Рис. 1) був у нижній частині ложа.
- Використовуйте вбудовані гачки для надійної фіксації компресора на спинці ліжка біля ніг або на місці з гладкою та рівною поверхнею.
- Підключіть компресор до матраца за допомогою з'єднувальних трубок.
- Підключіть компресор до розетки. Переконайтеся, що шнур живлення знаходиться у безпечному положенні.
- Увімкніть кнопку живлення на панелі керування компресора. Матрац автоматично почне заповнюватися повітрям.
- Коли матрац буде повністю надутий, налаштуйте його згідно з потребами користувача, використовуючи тумблер на панелі керування.



Рис. 1

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів однієї або декількох деталей, **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 24 місяці з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-MAT-PREMIUM» відповідає технічним вимогам і визначений придатним для експлуатації.

Виробник: Guangdong YueHua Medical Instrument Factory Co., Ltd. / Гуангдонг Іуегуа Медікал Інструмент Фастори Со., Лтд.
Rongsheng Science and Technology Zone Daxue Road 515063 Shantou, China / Ронгшенг Сціенце анд Течнологи Зоне, Дахуе Роад, 515063 Шантоу, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річча Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 3 від 17.12.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: необмежений.

Гарантійний термін на виріб: 24 місяці з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

