



Сходовий підйомник «PTR-130»

075701

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1.	Вступ.....	3
2.	Заходи безпеки	3
3.	Технічні характеристики.....	4
4.	Загальна характеристика.....	5
5.	Рекомендації щодо використання акумулятора	8
6.	Технічне обслуговування і догляд.....	9
7.	Відомості про сертифікацію.....	10
8.	Умови гарантії	11

[2]

Офіційна веб-сторінка: osd.ua

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.

УВАГА



Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Сходовий підйомник для інвалідів «075701» (далі за паспортом – сходовий підйомник / підйомник) – це електричний підйомник призначений для підняття і транспортування сходами інвалідів та людей, що не можуть пересуватися самостійно та потребують догляду. Використовується у різних медичних установах та вдома.

Сходовий підйомник **«075701»** легкий у використанні: в автоматичному режимі підйомник м'яко й плавно долає сходинку за сходинкою. Стійкість підйомника на сходинці контролює спеціальна гальмівна система. Підйомник **«075701»** досить легко складається й так само швидко розбирається, що спрощує зберігання та транспортування пристрою. Знімний акумулятор електропідйомника можна зарядити як від мережі, так і від автомобільного адаптера.

Сходовий підйомник для інвалідів **«075701»** розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

УВАГА



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які технічні характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені у Інструкції, наведені для ознайомлення.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування підйомника за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

1. Перед використанням **УВАЖНО** ознайомтеся з Інструкцією.
2. Перед кожним використанням **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан виробу. Не використовуйте його у випадку виявлення пошкоджень.
3. Максимально допустиме навантаження на підйомник становить – 130 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!

4. Кожні два роки слід **ПРОВОДИТИ** повний кваліфікований технічний огляд підйомника.
5. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попадання рідин на електричні частини підйомника.
6. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** підйомник за умов недостатнього заряду батареї.
7. **НЕ ЗАРЯДЖАЙТЕ** акумуляторну батарею у вологих приміщеннях
8. Під час підйому пацієнта **УНИКАЙТЕ** різких рухів та розгойдування.
9. Під час підйому пацієнта **ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ** на те, щоб рухи його тіла не були обмежені.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	075701
Вид:	електричний
Призначення:	пересування на інвалідному візку сходами
Конструкція:	розбірна
Матеріал:	авіаційний алюміній
Висота, (см):	93
Ширина, (см):	65
Довжина, (см):	138
Площа для розвороту підйомника, (см):	97 x 97
Максимальна висота сходинки, (см):	23
Швидкість підйому, (кроків/хв.):	10, 14, 18

Акумулятор, (В; Ач):	12; 5,2
Час заряду акумулятора, (ч):	8
Максимальний кут нахилу, (град.):	35
Ресурс роботи від однієї зарядки, (к-кість сходинок):	300 – 500
Зарядка від мережі (автомоб. адаптера):	так (так)
Кнопка миттєвої зупинки:	так
Вага, (кг):	27,6
Максимальне навантаження, (кг):	130
Гарантійний термін, (міс.):	12
Гарантія на акумулятор, (міс.):	6
Країна реєстрації бренду:	Італія
Країна-виробник:	Австрія

4. Загальна характеристика



УВАГА Перевіряйте справність підйомника перед кожним використанням, якщо підйомник використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, не використовуйте виріб.

Швидкість переміщення встановлюється на блоці:

- ❖ 1 = 10 сходів у хвилину
- ❖ 2 = 14 сходів у хвилину

❖ 3 = 18 сходів у хвилину

Максимальна висота сходів: 23 см.

Заряду акумулятора достатньо для подолання 300 – 500 сходів. Це залежить від ваги пасажира та в якому напрямку рухається підйомник.

Якщо підйомник знаходитьсь у весь час в експлуатації то, за необхідності акумулятор можна замінити або зарядити з допомогою зарядного пристроя.

Ємкість акумулятора та напруга: 12 В; 5,2 А.

Захист від перевантаження:

1. Механічний захист від перевантаження.
2. Електронна система захисту від перевантаження.

Колеса, що встановлені на підйомник, розраховані на плавну роботу. Діаметр основних коліс – 7 дюймів, а допоміжних – 3 дюйми.

Аксесуари для підйомника «075701» спеціально розроблені для задоволення індивідуальних потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Якість технічного рішення та дизайн мають важливе значення для користувача.

Особливості:

- Електронний захист від перенавантаження
- Електронний датчик нахилу
- Візуальне попередження при невірному куті нахилу
- Роботу системи контролює мікропроцесор
- Інтегрована система діагностики
- Система зчитування часу роботи
- Високий рівень автономності: до 50 поверхів
- Підсвічування руху
- Ключ запалювання
- Кнопка аварійної зупинки



СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ




Ремінь поясний для PTR



Шнур живлення PTR

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

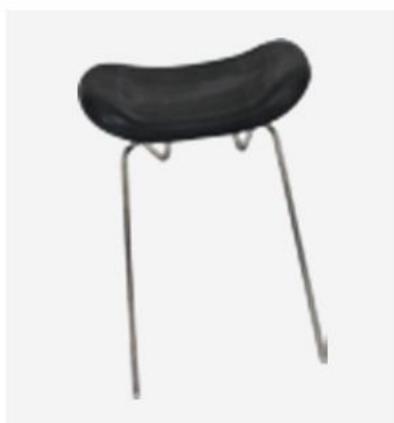

Підголівник PTR



Подушка під спину PTR



Рампа PTR



Панель керування на ручці

Регульована фіксація спинки

Панель управління блоку

5. Рекомендації щодо використання акумулятора

ДОПУСТИМО:

- ВИКОНУЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ з налаштування акумулятора, надані постачальником обладнання.
- ЗАРЯДЖАЙТЕ НОВУ БАТАРЕЮ за 12 годин до її використання. Для досягнення оптимальної продуктивності батареї може знадобитися до 6-ти циклів зарядки/роздрядки. ЗАВЖДИ ПЕРЕЗАРЯДЖАЙТЕ акумуляторні батареї не менше 12-ти годин після використання.
- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що зарядний пристрій перемикається з об'ємного (зазвичай позначається червоним або синім світлодіодом) на плаваючий заряд (зазвичай позначається зеленим світлодіодом) протягом 12-ти годин після зарядки. Якщо це НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ протягом 12-ти годин, від'єднайте акумулятор від зарядки, використайте, а потім зарядіть.
- ЗБЕРІГАЙТЕ АКУМУЛЯТОР у повністю зарядженному стані.
- ЗАРЯДЖАЙТИ акумулятор при кожній нагоді незалежно від стану заряду.

НЕДОПУСТИМО:

- Повністю або частково РОЗРЯДЖАТИ акумулятор та ЗАЛИШАТИ його у розрядженному стані. Це може привести до внутрішнього пошкодження батареї та зменшити термін її служби.
- ПЕРЕВИЩЕННЯ максимально допустимого навантаження, встановленого виробником

виробу.

- **НЕ ЗАЛИШАЙТЕ** акумулятор в місцях, де він може **ВПАСТИ**, так як це може **ПОШКОДИТИ** його.

ТЕРМІН СЛУЖБИ БАТАРЕЇ:

- Термін служби батареї залежить від глибини розряду та числа виконаних циклів => 1 заряд + 1 розряд = 1 цикл.
- Коли батарея досягає 60 % від початкової ємності, то її термін служби вважається закінченим.

ФАКТОРИ ТА ПАРАМЕТРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОБОТУ БАТАРЕЇ:

- Навантаження на пристрій (інвалідний візок, підйомник тощо).
- Кількість виконаних циклів за тиждень (к-ть використання пристрою за тиждень).
- Глибина розряду (тривалість використання пристрою без зарядки).
- Режим зарядки.
- Вік та стан пристрою: нові батареї, встановлені у новий пристрій, прослужать довше, аніж нові батареї, встановлені у старий пристрій.
- Зберігати батарею необхідно при температурі навколошнього середовища 20 ° C.

УВАГА



Гарантійний термін на акумулятор складає 6 місяців.

6. Технічне обслуговування і догляд

За умов забруднення пристрою його поверхню можна обробляти неагресивними миючими та дезінфікуючими засобами, уникаючи рухливих частин та елементів. Щоразу перед початком експлуатації слід візуально оглянути пристрій на наявність пошкоджень. У разі сумнівів не використовуйте пристрій і не намагайтесь полагодити самостійно. Зверніться до місцевого дилера або до місця придбання товару за подальшими інструкціями.

Зовнішню поверхню підйомника обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте підйомник у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції підйомника, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

УВАГА



У лікарнях необхідна постійна дезінфекція. На разі використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати підйомник, щоб уникнути інфекції.

7. Відомості про сертифікацію

Виріб «075701» відповідає технічним вимогам і визнаний придатними для експлуатації.



Виробник: SANO Transportgeraete GmbH / САНО

Транспортгерает ГмБХ.

Am Holzpoldlgut 22, 4040 Linz/Lichtenberg Austria/ Ам Холзполдлгут 22, 4040 Лінз/Ліхтенберг, Австрія.

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»;
адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 6 від 25.06.2020.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на виріб «075701»: 12 місяців з дати продажу за умови виконання вимог інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.





8. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристроя.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (четирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:
Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____