



## Протипролежнева подушка «ROHO»

QS88C / QS89C / QS99C / QS910C

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.  
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЕС

## ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки.....	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Комплектація .....	4
5. Налаштування та регулювання подушки з повітряною флотацією .....	5
6. Очищення та дезінфекція подушки «ROHO» з повітряною флотацією.....	11
7. Відомості про сертифікацію .....	12
8. Умови гарантії .....	13

[2]

Офіційна веб-сторінка: osd.ua

## 1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь-ласка уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



- УВАГА**
- Не використовуйте протипролежневу подушку, не ознайомившись з Інструкцією.**
  - Не використовуйте протипролежневу подушку у випадку її пошкодження.**
  - Не намагайтесь внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Протипролежнева подушка «QS88C / QS89C / QS99C / QS910C» розроблена для максимальної зручності та безпеки користувача. Розрахована для використання у житлових приміщеннях.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄС виробів медичного призначення.

Параметри подушки:

- використовується від пролежнів 1-4 ступеня;
- енергонезалежний;
- імітація властивостей води;
- міцний неопрен;
- без обмежень на максимально допустиме навантаження.

### Концепція повітряної флотації

Сутність процесу врегулювання наданої продукції полягає у максимально глибокому зануренні пацієнта у подушку, не досягаючи її основи. Переконатись у правильності положення на подушці можна лише, коли пацієнт сидить на ній. Розташуйте долоню між максимально зануреною частиною тіла пацієнта та поверхнею подушки.



- УВАГА**
- Запобігайте контакту продукту з гострими предметами, а також потраплянню попелу від цигарок.**

## 2. Заходи безпеки

Перед початком використання подушки або під час використання після тривалого зберігання переконайтесь, що всі частини подушки у належному стані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан подушки.

1. Проводьте **ЩОДЕННИЙ** огляд кожної секції подушки «РОНО» на наявність будь-яких недоліків.
2. **РЕГУЛЯРНО** перевіряйте цілісність усієї подушки.
3. Наповнювати повітрям подушку **НЕОБХІДНО** за допомогою ручного насоса, що входить у комплект. **ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИСТРОЇВ МОЖЕ ПОШКОДИТИ ВИРІБ.**
4. Під час наповнення подушки повітрям стежте за її станом. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** перекачування або недокачування.
5. **НЕ ТРИМАЙТЕ** виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я).
6. Якщо виріб знаходився в умовах низької температури (не нижче 0°), залиште його на деякий час в житловому приміщенні за температури близько 22° та **ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЦЬОГО** відкривайте повітряний клапан. Випустіть усе повітря та знову наповніть. Повторіть процедуру декілька разів. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб не пошкоджено та робоча кондиція повернута. Тільки після цього подушку можна далі експлуатувати.


7. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** щільні товсті матерії, покривала тощо. Це зменшить терапевтичний ефект дії виробу. За необхідності проконсультуйтесь з лікарем.
8. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попаданню на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття подушки та порушити її функціональність.
9. **НЕ НАМАГАЙТЕСЯ** наповнити виріб будь-якої іншою рідиною (водою). Дизайн та конструкція подушки передбачає використання тільки повітря.
10. Правильне положення подушки на поверхні – комірами догори.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування протипролежневої подушки за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### 3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	QS88C / QS89C / QS99C / QS910C
Матеріал:	неопрен
Ефективність проти пролежнів:	1-4 ступеня
Розміри, Д x Ш, (см):	від 38 x 38 до 41 x 46
Висота комірів, (см):	10
Вага, (кг):	2
Максимальне навантаження, (кг):	не обмежена

### 4. Комплектація

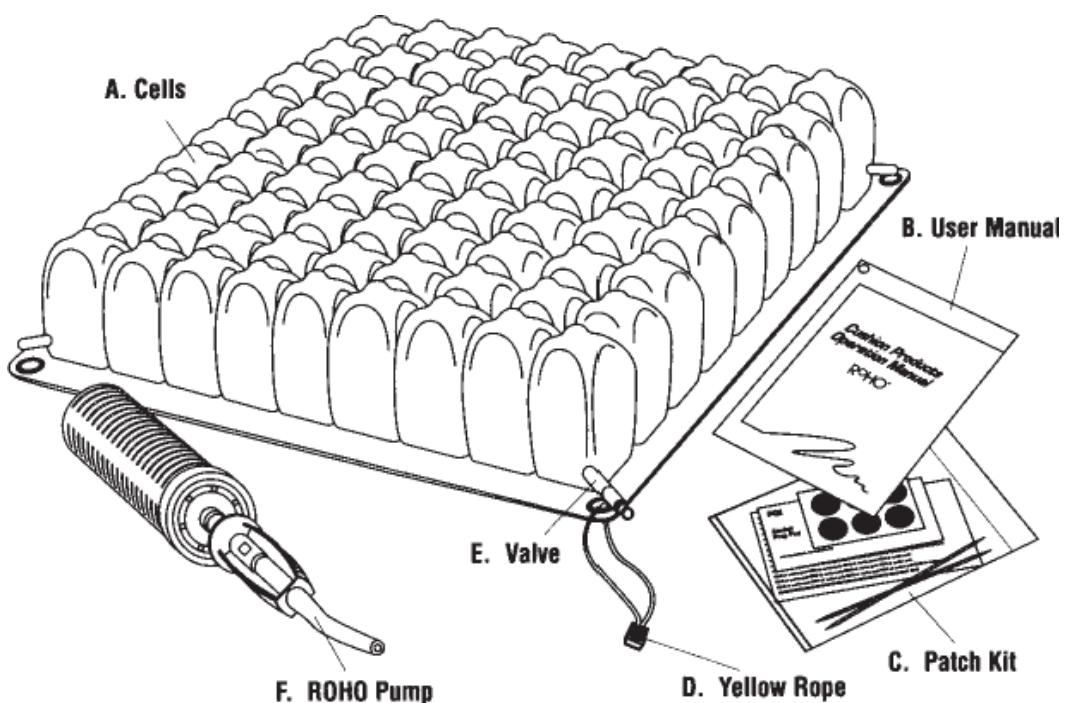

A. Коміри	Незалежні повітряні кишені.
B. Інструкція для користувача	Інструкції з експлуатації, налаштування, догляду, а також інша необхідна користувачеві інформація.
C. Набір інструментів	Комплект інструментів для дрібного ремонту.
D. Жовта мотузка	Призначена для підняття та переносу подушки.
E. Клапан	Призначений для наповнення подушки повітрям. Деякі моделі можуть мати кілька клапанів. Клапан не повинен застосуватись для підняття та транспортування подушки.
F. Ручний насос	Застосовується для наповнення виробу повітрям.
G. Чохол	Призначений для захисту поверхні подушки. Обережно просуйте подушку у чохол до тих пір, доки клапан та металічна втулка не зайдуть своє відповідне положення у правому куті покриття. Під час просування подушки у чохол стежте за клапаном та жовтою мотузкою.
H. Подушка	Протипролежнева подушка «QUADTRO SELECT» високого профілю.

## 5. Налаштування та регулювання подушки з повітряною флотацією




Якщо будь-яка частина тіла пацієнта торкається основи подушки – це означає, що було випущено забагато повітря. Відповідно, зменшується терапевтичний ефект дії подушки. Для усунення повторіть процедуру налаштування ще раз. Щоб переконатися у правильному налаштуванні, а також щоб уникнути спускання подушки, перевіряйте виріб щодня.

**Щоб досягти максимального терапевтичного ефекту та комфорту від подушки «ROHO» з повітряною флотацією, дотримуйтесь наступних правил:**



**Етап I. Розпакуйте упаковку та вийміть подушку**  
 Подушки серії SELECT® відкривають нові перспективи у виборі протипролежневої системи для інвалідних візків. Інноваційна технологія ISOFLOT™ Memory Control Unit дозволяє швидко і зручно налаштовувати подушку під індивідуальні вимоги користувача.

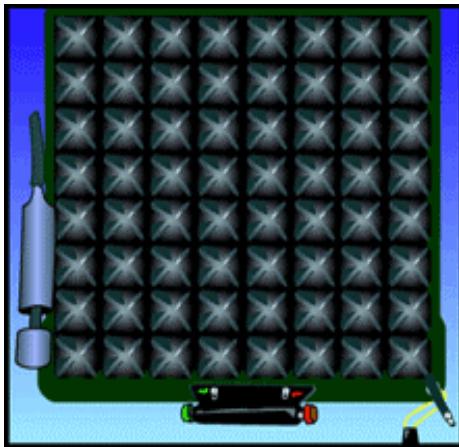


## Етап II. Перевірте продукт

У комплекті з продуктом постачаються: подушка, чохол, ручний насос, Інструкція користувача.



1. Чохол для подушки рекомендовано для використання, але не зображене у графічних ілюстраціях даної Інструкції.

2. Для транспортування подушки використовуйте оригінальну упаковку.

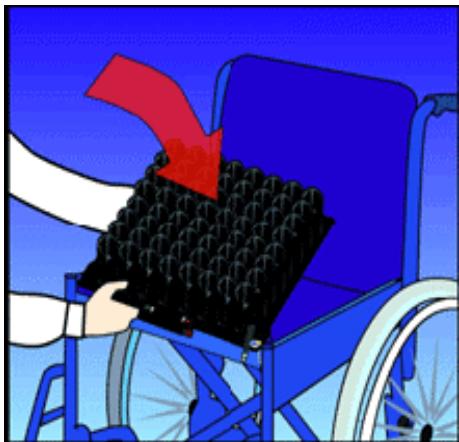


## Етап III. Розміщення подушки

Розкладіть подушку в інвалідному візку комірками ISOFLO Memory Control Unit доГори. Переконайтесь, що подушка розташована правильно та відповідає необхідному розміру сидіння візка.




## Етап IV. Відкрийте повітряний клапан

Відкрийте клапан, відкручуючи його проти руху годинникової стрілки.

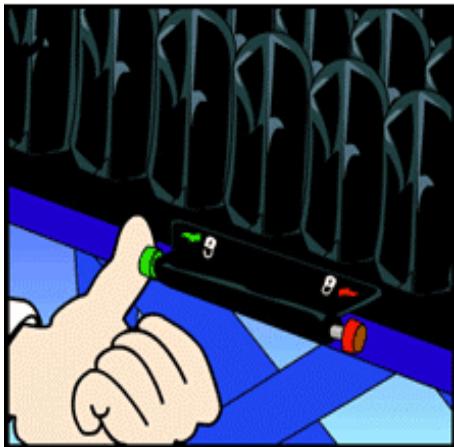


#### Етап V. Відкрийте систему ISOFLO Memory Control

Відкрийте систему ISOFLO Memory Control рухом вправо, як зображенено на картинці.

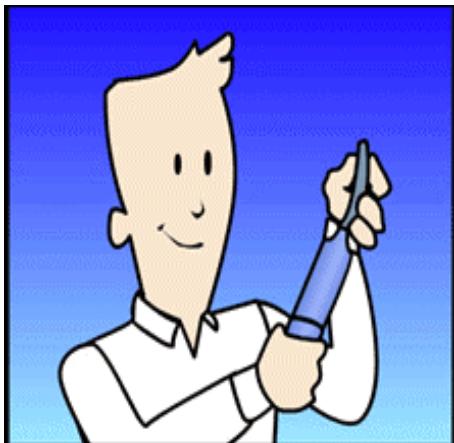


#### Етап VI. Регулювання насосу

Насос обладнаний зручною гнучкою гумовою насадкою.

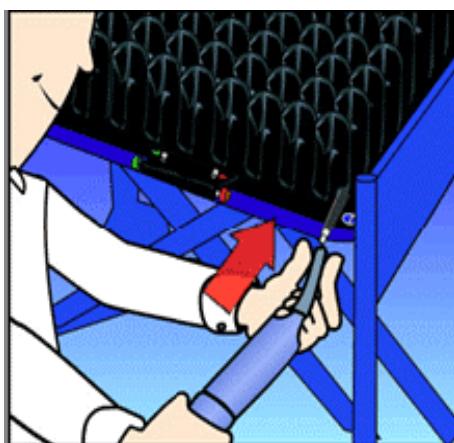

#### Етап VII. Під'єднайте насос до подушки

Під'єднайте гумову насадку на насосі до повітряного клапана на подушці.

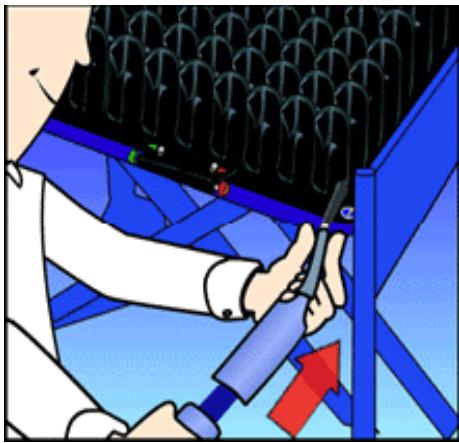


#### Етап VIII. Наповніть повітрям подушку

Закачувати повітря в подушку слід доти, доки подушка під тиском повітря не почне вигинатися дугою.




#### Етап IX. Від'єднайте насос і закройте клапан

Від'єднайте насос і швидко закройте клапан, закручуючи його за рухом годинникової стрілки.

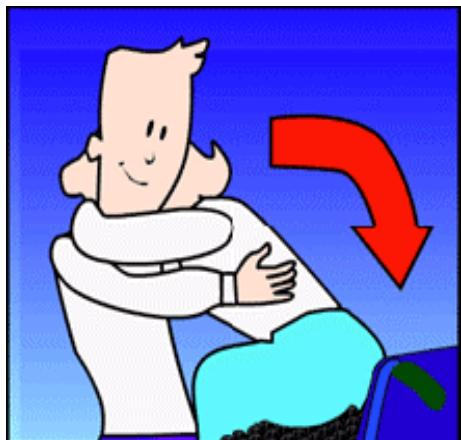

#### Етап X. Розміщення користувача

Переконайтесь, що подушка правильно розміщена на сидінні візка. Допоможіть користувачеві обережно сісти в інвалідний візок.

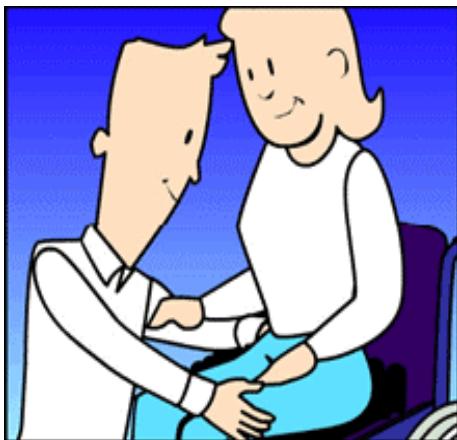


#### Етап XI. Посадка користувача

Допоможіть користувачеві зайняти його звичайну позу для сидіння.




#### Етап XII. Позиція «долоні» під час регулювання

Асистенту необхідно підкласти руку долонею до низу під пацієнта у місце найбільшого навантаження, як зображенено на малюнку.

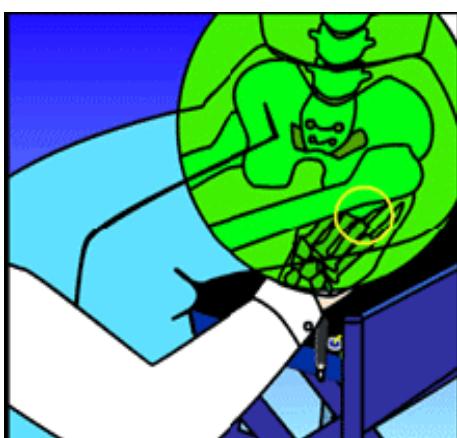


#### Етап XIII. Правильне розміщення руки під час регулювання

Зазвичай, місце найбільшого навантаження – це сідничні нерви. Якщо Ви не впевнені у правильності розміщення долоні, то попросіть пацієнта трохи пристати у візку, і якщо все вірно, то Ваша рука буде під тазовою кісткою пацієнта.

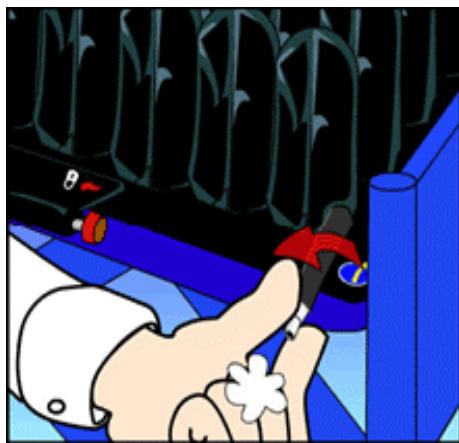

#### Етап XIV. Випускання повітря

Не виймаючи руки з-під тіла пацієнта, вільною рукою, не поспішаючи, відкручуйте клапан, поступово випускаючи зайве повітря.

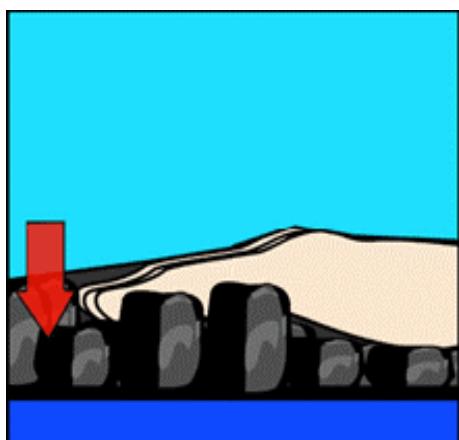


#### Етап XV. Регулювання повітряних комірок

Рука асистента повинна спокійно погрузнути в комірках. Отриманий простір між повітряними комірками подушки та тілом пацієнта має дорівнювати приблизно 1,5 - 2 см. Пальці руки асистента повинні відносно вільно рухатись у цьому просторі.




#### Етап XVI. Закрийте клапан

Закрийте клапан та переконайтесь, що немає витоку повітря з подушки.

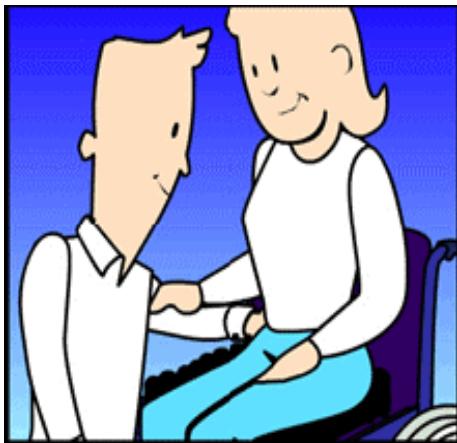

#### Етап XVII. Позиція пацієнта на подушці

Пацієнту слід розташуватися на подушці у візку у звичній та найзручнішій для нього позі. Повітря розподілиться по комірках та завдяки технології ISOFLO Memory Control Unit повторюватиметься контур тіла пацієнта відносно цієї пози.

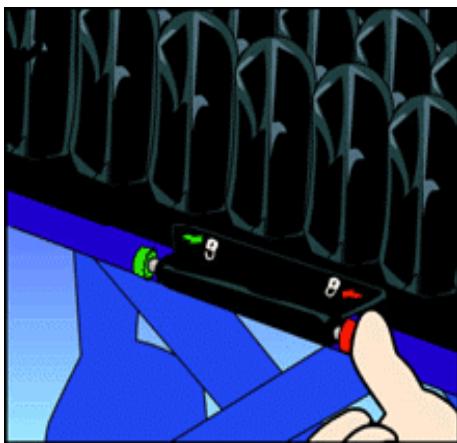

#### Етап XVIII. Заблокувати систему ISOFLO Memory

Натисніть блокуючу кнопку червоного кольору так, щоб вона піддалася вліво. У такій зафікованій позиції повітря не зможе виходити з подушки, а система ISOFLO Memory забезпечить індивідуальну форму подушки.

Слід звернути увагу на те, що перекачування повітрям так само зменшує терапевтичний ефект дії подушки, як і недокачування, що є відхиленням від правильного налаштування кондиції подушки.

## 6. Очищення та дезінфекція подушки «РОНО» з повітряною флотацією

Очищення та дезінфекція – це два різних процеси.

Очищення потрібно проводити перед дезінфекцією. Для цього необхідно випустити повітря з подушки, закрити клапан та покласти подушку у раковину чи ванну. Використовуйте м'яку пластичну щітку або губку для очищення комірок та простору між ними. «РОНО» рекомендує використовувати рідину для миття посуду, пральний порошок чи будь-який інший миючий засіб загального призначення.

Для очищення чохла використовуйте пральну машину чи ручне прання у холодній воді та миючими засобами, що використовуються для очищення подушки. Для дезінфекції використовуйте бактерицидні засоби, які відповідають вимогам знезараження. «РОНО» рекомендує дезінфектант з протитуберкульозною активністю.

Для домашньої дезінфекції використовуйте наступний розчин:

Розведіть 125 мл розчину відбілювача (чи хлорвмістної рідини) на 1 л води.

Очищену мокру подушку з дезінфікуючим розчином залиште на 10 хв., потім ретельно промийте та висушіть.

Для лікувальних установ можна використовувати більш активні та бактерицидні дезінфектанти,

якщо вони безпечні та застосовуються у відповідності до інструкції виробника.

Стерилізація: «ROHO» не схвалює метод стерилізації з використанням температурного режиму вище 93 °C. Висока температура прискорює старіння і може пошкодити структуру та конфігурацію подушки. Якщо за вимогою лікувальної установи необхідна стерилізація, відкрийте клапан та використовуйте найбільш низький температурний режим з мінімальною затратою часу. Надається перевага більше хімічній стерилізації, аніж паровій (в автоклаві). Але жодна **НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ**.



**НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** засоби на масляній основі, оскільки вони можуть викликати ушкодження цілісності неопрену.

## 7. Відомості про сертифікацію

Виріб «QS88C / QS89C / QS99C / QS910C» відповідає технічним вимогам і визнано придатними для експлуатації.



**Виробник:** ROHO, Inc. / РОХО, Інк.

100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois, 62221, US / 100

Норт Флоріда Авеню, Бельв'єль, Іллінойс, 62221, США.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 4 від 01.07.2019.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

Гарантійний термін на виріб – 3 роки з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.





## 8. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 36 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристроя.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (четирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:  
*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_