



Алюмінієвий ролер

OSD-88511/ OSD-88512

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Використання	4
5. Технічне обслуговування і догляд.....	5
6. Відомості про сертифікацію.....	5
7. Умови гарантії	6

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте коляску, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте коляску у випадку її пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Ходунки колісні «OSD-88511/OSD-88512» розроблені для максимальної зручності та безпеки користувача. Розраховані для використання для застосування у медичних закладах та вдома.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 94/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

Параметри ролеру:

- висота сидіння від підлоги – 50-65 см;
- литі задні і передні колеса, діаметром – 8 дюйми;
- висота ручок – 85-94 см.
- легка алюмінієва рама

2. Заходи безпеки

Перед початком використання ролеру або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що всі частини ролеру закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан ролеру: усі елементи з часом зношуються, особливо це стосується коліс, сидіння, та ручок.

Максимально допустиме навантаження на ролер – 136 кг. **НІКОЛИ НЕ ПЕРЕВИЦЬУЙТЕ ДОПУСТИМИЙ ЛІМІТ ВАГИ!**

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування ролеру за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Артикул	
Модель:	OSD-88511	OSD-88512
Різнovid:	на колесах	
Конструкція:	розбірна, складана	
Колір рами:	червоний	синій
Матеріал рами:	алюміній	
Матеріал руків'я:	пластик	
Ширина, (см):	63	
Сидіння, Ш x Д, (см):	35 x 32	
Висота ручок, (см):	85-94	
Висота сидіння від підлоги, (см):	50-65	
Розмір коліс, (дюйми):	8"	
Вага виробу, (кг):	9	
Максимальне навантаження, (кг):	136	
Гарантія (міс.)	12	

4. Використання

Розкладання

1. Розкладіть раму.
2. Відрегулюйте бажану для користувача висоту за допомогою ручок.
3. Перевірте «ходові якості» ролера.

Гальма

Важливо, щоб гальма були у «паркувальному» положенні. Для гальмування потягніть руків'я догори.

Регулювання висоти ручок

Для регулювання висоти ручок потрібно відкрутити фіксуючі важелі та відрегулювати опертя на відповідній висоті. Опора ніколи не повинна бути вище, ніж зазначено на трубках з рельєфними насічками. Ручки потрібно розташувати на висоті зап'ястя. Затягувати стопорні важелі треба таким чином, щоби вони були направлені донизу. Для того, щоби повернути важіль, треба спочатку потягнути його назвні.



Перевіряйте гальмівний механізм опісля урегулювання висоти руків'я. Переконайтеся, що всі кріплення надійно затягнуті та зафіксовані.

5. Технічне обслуговування і догляд

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезін- фікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

6. Відомості про сертифікацію

Виріб «OSD-Q88511/OSD-Q88512» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



Виробник: Zhongshan Qunn Medical Equipment Co., Ltd. / Жонгшан Куїнн Медікал Еквіпмент Ко., Лтд. 3rd Booth No. 108 Zhaoyi Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong, The people's republic of China / 3 Бус №108 Чжаойі Роад, Донгшенг Таун, Жонгшан Сіті, Гуангдонг, Китайська народна республіка.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»;
адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський, 100/2.
Тел.: +38 (044) 425-59- 52, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 1.12.2023.

Термін придатності виробу: див. на маркованні.

Гарантійний термін на виріб «OSD-Q88511/OSD-Q88512»: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Інструкції.



7. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____